



Neutrale Personen, die als Zeugen Ihre Probenahme dokumentieren können, sind:

Arzt, Apotheker, Hebamme, Mitarbeiter des Jugend- und Gesundheitsamtes, Notar, Krankenhauspersonal. Sie begleiten die Probenahme, kontrollieren die Übertragung der persönlichen Daten und versenden anschließend die Testunterlagen.



Anleitung zur Probennahme auf der Rückseite

Allgemeines

Öffnen Sie das Testset und entnehmen Sie das Formular

⇒ Formularseite 1:

Mit ihrer Unterschrift geben alle Teilnehmer ihre Einwilligung zur DNA Analyse

Der Probenehmer trägt seine Daten ein und bestätigt die Durchführung der Probenahme

⇒ Formularseite 2:

Geben Sie uns Ihre Kontaktdaten und kreuzen Sie an, wenn Sie ein Gutachten möchten

⇒ Fügen Sie eine klare, deutliche Kopie aller Ausweisdokumente bzw. Geburtsurkunden bei



Rücksendung an unser Labor

Der Probenehmer legt die kompletten und unterschriebenen Unterlagen in den Rückumschlag:

- ✓ alle Formulare
- ✓ die Kopien der Ausweise bzw Geburtsurkunden
- ✓ die beschrifteten und verschlossenen Probenumschläge

Wichtig: der **Probenehmer** sendet den Rückumschlag an uns. Anderes ist nicht zulässig (Gefahr der Manipulation an den Proben) und führt dazu, dass wir den Test nicht bearbeiten können.



Der Versand Ihres Gutachtens

Gutachten werden an alle auf Formularseite 2 aufgeführten Personen gesendet.



08092 8289 222

Stellen Sie sicher, dass alles ausgefüllt und unterschrieben ist.

Die Analyse wird sich verzögern, wenn Unterschriften oder Unterlagen fehlen. Für minderjährige Teilnehmer müssen **alle** Sorgeberechtigten unterschreiben.



Die Probenahme

Wichtig: Vertauschungen vermeiden. Probenahme eines Teilnehmers immer erst komplett beenden, bevor mit der nächsten begonnen wird.

1: Öffnen Sie den Umschlag "Probenentnahmeset". Entnehmen Sie die Probenumschläge. Ein Probenumschlag wird mit den persönlichen Daten des Teilnehmers beschriftet

2: Dieser Testteilnehmer entnimmt jetzt seine DNA-Proben wie folgt:

Das Wattestäbchen mit einer leichten Drehbewegung an der Wangeninnenseite auf- und abreiben. Mit dem zweiten Stäbchen wird der Vorgang auf der anderen Mundseite wiederholt

3. Die benutzten Teststäbchen direkt nach der Probenahme ohne Trocknungszeit in den beschrifteten Probenumschlag stecken.

Für die Probenahmen bei den anderen Testpersonen bitte genauso verfahren.